EMULADOR DE ESTERILIZACIÓN TIPO 6 DE TRES FASES

REF. 4500014004

Tiras indicadoras de verificación de ciclo tipo 6 para procesos de esterilización para vapor.

Resultado inmediato

Precisión de acuerdo con la norma ISO 11140 para indicadores tipo 6.

Valores establecidos mínimos (Sv): 134 °C - 7 minutos / 121 °C - 20 minutos

Libre de plomo y de metales tóxicos

Color inicial: punto 1: rosa; punto 2: naranja: punto 3: amarillo

Color final: negro. El punto 3 vira a negro solamente con ciclos con temperatura y/tiempo superiores a los indicados en los valores establecidos. El punto 1 vira en valores inferiores a los indicados. El viraje a negro del punto 2 indica los valores establecidos.

Presentación: Tiras de papel bilaminado de 80 x 23 mm. Envase x 250 unidades.

Marca Kims - Industria Argentina



