

INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN PARA FORMALDEHÍDO TIPO 4 (SPOTS REACTIVOS)
REF. 4500002013

Spots tipo 4 para procesos de esterilización por vapor / formaldehído

Resultado inmediato

Precisión de acuerdo con la norma ISO 11140 para indicadores tipo 4.

Libre de plomo y de metales tóxicos

Color inicial: verde


Color final: amarillo.

Presentación: Spots de papel autoadhesivo de 12 mm de diámetro, en hojas troqueladas con 32 spots. Envase plástico x 1024 spots.

Marca Kims - Industria Argentina

FORM spots


KIMS Spots reactivos autoadhesivos indicadores para procesos de esterilización por vapor-formaldehído (LTSF)

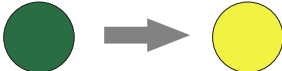Vira de verde a amarillo  **FORM**

Indicador de esterilización tipo 4
Valores establecidos
Concentración: 2 g/litro Vapor saturado a 50 °C (P: 123 mb) tiempo: 120 min o
Vapor saturado a 60 °C (P: 200 mb) tiempo: 60 min.

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS
NO EXPONER A LA LUZ DURANTE PERIODOS PROLONGADOS (VARIOS DÍAS)
MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL HASTA EL MOMENTO DE SU USO
EVITAR ALMACENAR JUNTO A SUSTANCIAS QUÍMICAS VOLÁTILES
NO ALMACENAR EN LABORATORIOS QUÍMICOS NI EN DEPÓSITOS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
PRODUCTO PARA UN SOLO USO

Contenido
1024 spots autoadhesivos de 12 mm de diámetro en hojas de 32 spots cada una.
Total: 32 hojas

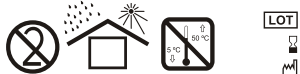

Fabricado por KIMS S.R.L. - Villa Martelli - Buenos Aires - Argentina
Autorizado por ANMAT PM 1454-44
Director técnico: Adonis P. Theriano - Farmacéutico MP 7318
www.kims.com.ar